


Material File Update

3Shape Dental Manager

Import Materialdatei (1/5)

Hinweis: Falls Sie individuelle Einstellungen nutzen, sollten diese vor dem Update unbedingt gesichert werden. Dies können Sie zum Beispiel mit einer Kopie Ihres 3Shape Configuration Ordners auf der Festplatte C:/ tun.

1. Öffnen Sie das **Control-Panel (1)**.

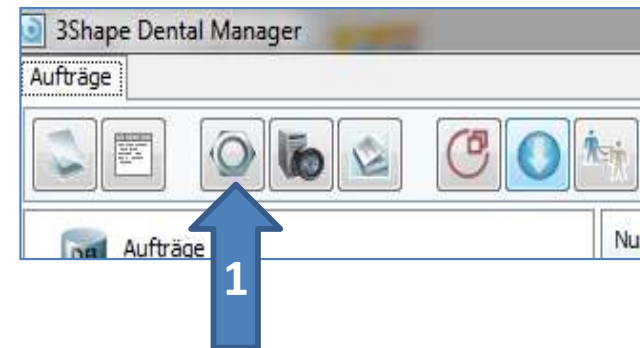


2. Klicken Sie auf **Hersteller (2)**.



Import Materialdatei (2/5)



3. Wählen Sie **Kulzer Milling Center (1)** und klicken Sie auf **Materialien herunterladen (2)**.

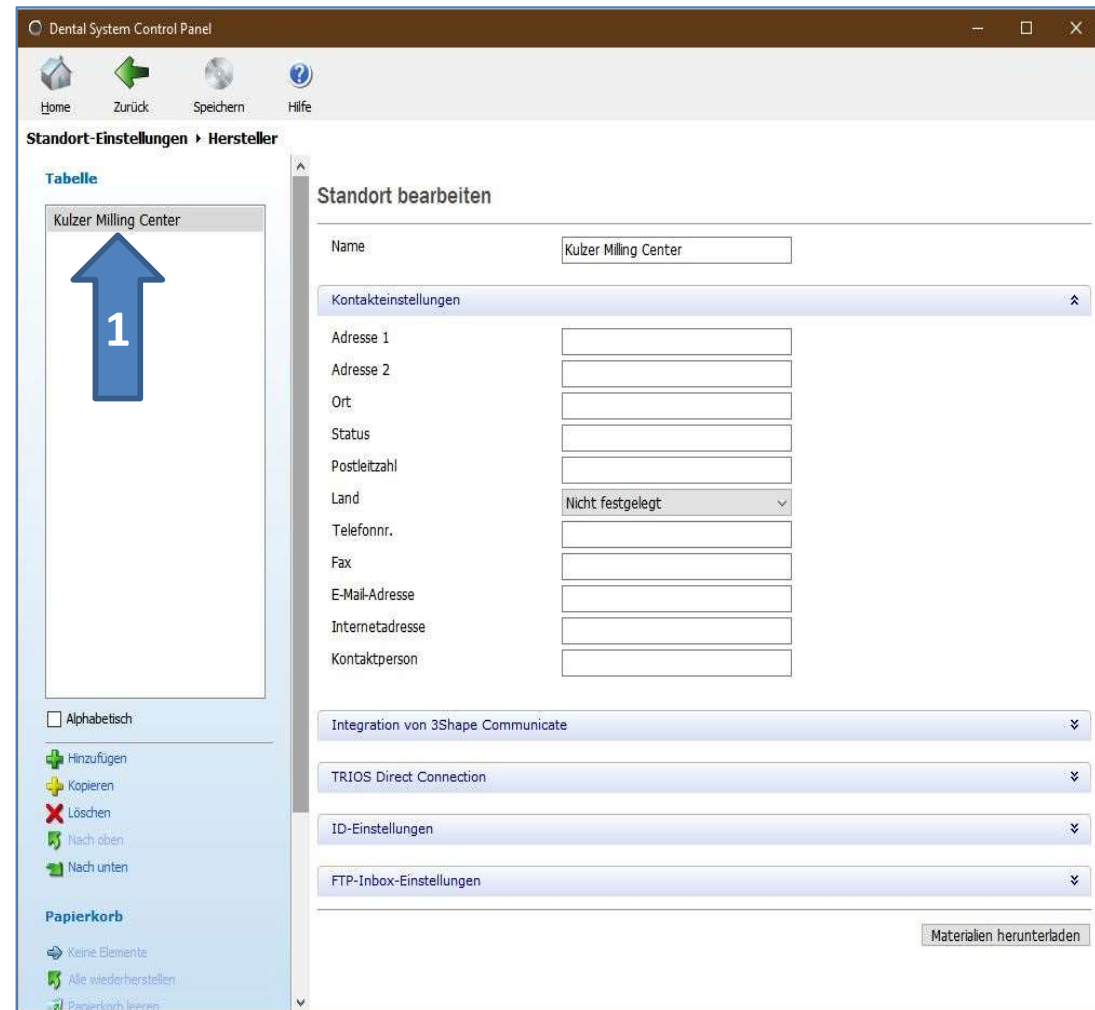

Import Materialdatei (3/5)


4. Klicken Sie auf **Importieren**.

5. Setzen Sie den Haken bei **Für alle ähnlichen Fälle das Gleiche durchführen (1)**. Danach klicken Sie auf **Aktualisieren (2)** oder **Umbenennen (2)**. Das System arbeitet nun für ein paar Minuten.

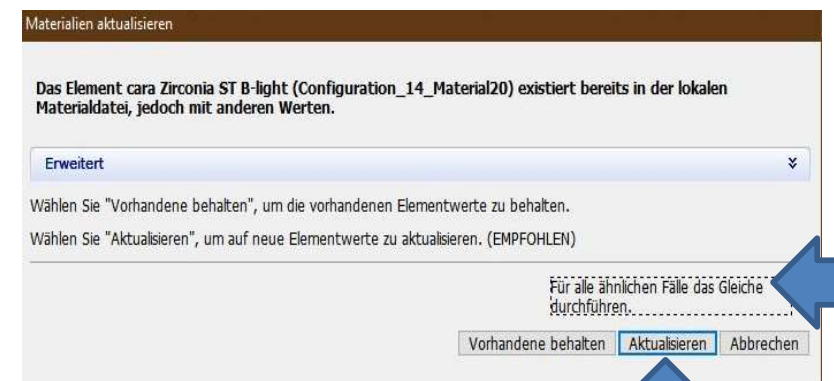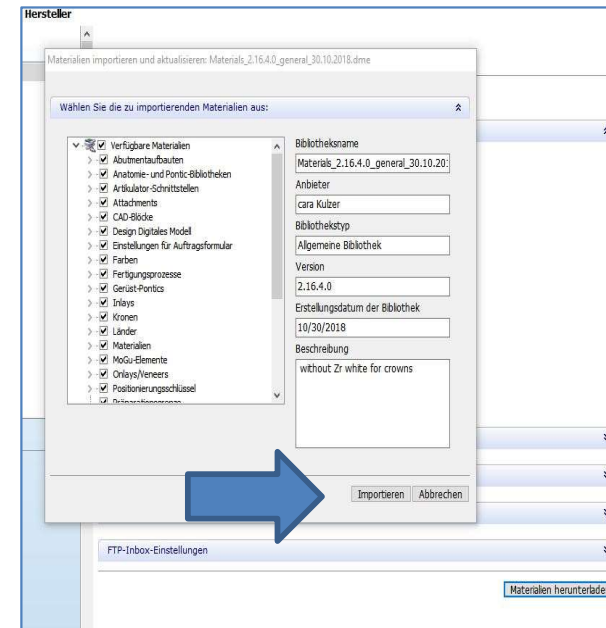

Import Materialdatei (4/5)

6. Nun folgt die Aufforderung zur Löschung des nicht mehr verfügbaren Materials i-PD PMMA medium. Klicken Sie auf „Ja, für alle“.

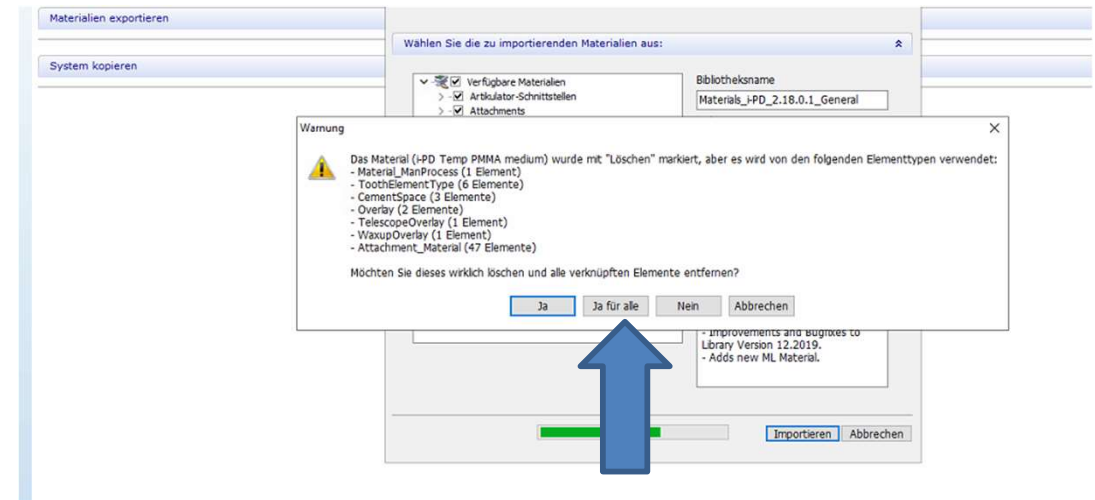

7. Nach erfolgreichem Importieren klicken Sie bitte auf **OK**. Schließen Sie das Control-Panel und klicken Sie auf „Ja“ zum Sichern der Daten.



Import Materialdatei (5/5)

8. Der Hersteller **Kulzer Milling Center** hat sich auf **i-ProDens Laser/ Milling Center** aktualisiert.

